


INDIKATIONSTABELLE

KATEGORIE	INDIKATION	TIER	PROGRAMM	WIE OFT	HINWEIS
Prophylaxe	Aufwärmen, vor dem Training	Pferd, Hund	2	bei Bedarf	10 – 15 Minuten vor Belastung
Prophylaxe	Training, Sport, Wettkampf	Pferd, Hund	2	bei Bedarf	10 Minuten vor Belastung
Regeneration	Allgemein	Pferd, Hund	2	1 x täglich	
Haut	oberflächliche Rötung / Entzündung	Pferd, Hund	1	1 – 2 x täglich	keine Wärme!
Haut	oberflächliche Wunde	Pferd, Hund	1	1 – 2 x täglich	keine Wärme!
Haut	leichte Schwellung	Pferd, Hund	9	1 x täglich	keine Wärme!
Haut	tiefe Wunde, trocken	Pferd, Hund	9	1 – 2 x täglich	keine Wärme!
Haut	tiefe Wunde, feucht	Pferd, Hund	1	1 – 2 x täglich	danach Programm 9
Haut	akute Wunde / Verletzung	Pferd, Hund	9	1 – 2 x täglich	keine Wärme!
Sehnen / Faszien	Füllung Sehnenscheide, Gallen	Pferd, Hund	5	1 x täglich	
Sehnen / Faszien	leichte Zerrung	Pferd, Hund	3	1 – 2 x täglich	1 Woche, danach Kontrolle
Sehnen / Faszien	Zerrung / Verklebung	Pferd, Hund	4	2 x täglich	1 Woche, danach Kontrolle
Sehnen / Faszien	leichte Schwellung, kalt	Pferd, Hund	2	1 – 2 x täglich	
Sehnen / Faszien	Schwellung, warm	Pferd, Hund	9	1 – 2 x täglich	wenn keine Wärme mehr, dann Programm 5
Sehnen / Faszien	Sehnenriss / -anriss, Erstbehandlung	Pferd, Hund	6	1 x täglich	2 Wochen, dann Programm 5
Sehnen / Faszien	Sehnenriss / -anriss, Folgebehandlung	Pferd, Hund	5	1 – 2 x täglich	bis zur Heilung, Kontrolle durch Ultraschall
Sehnen / Faszien	Fesselträger, warm	Pferd	9	1 – 2 x täglich	wenn keine Wärme mehr, dann Programm 6
Sehnen / Faszien	Fesselträger, kalt	Pferd	6	1 – 2 x täglich	
Sehnen / Faszien	Zerrung Bizepssehne	Pferd, Hund	4	2 x täglich	
Muskulatur	vorbeugend	Pferd, Hund	2	bei Bedarf	10 Minuten vor Belastung
Muskulatur	Aufwärmen	Pferd, Hund	2	bei Bedarf	10 – 15 Minuten vor Belastung
Muskulatur	Förderung der Durchblutung	Pferd, Hund	8	bei Bedarf	10 Minuten vor Belastung
Muskulatur	Verspannungen, allgemein	Pferd, Hund	2	1 x täglich	1 Woche, dann Kontrolle, ggfs Wechsel auf 7
Muskulatur	Verspannungen, HWS	Pferd, Hund	2	1 – 2 x täglich	1 Woche, dann Kontrolle, ggfs Wechsel auf 7
Muskulatur	Verspannungen, LWS	Pferd, Hund	2	1 – 2 x täglich	1 Woche, dann Kontrolle, ggfs Wechsel auf 7
Muskulatur	Verspannungen, Nacken – Schulter	Pferd, Hund	2	1 – 2 x täglich	1 Woche, dann Kontrolle, ggfs Wechsel auf 7
Muskulatur	Verspannungen, Schulter – Arm	Pferd, Hund	2	1 – 2 x täglich	1 Woche, dann Kontrolle, ggfs Wechsel auf 7
Muskulatur	Verspannungen, Glutealmuskulatur	Pferd, Hund	2	1 – 2 x täglich	1 Woche, dann Kontrolle, ggfs Wechsel auf 7
Muskulatur	Verspannungen, Sitzbeinmuskulatur	Pferd, Hund	2	1 – 2 x täglich	1 Woche, dann Kontrolle, ggfs Wechsel auf 7
Muskulatur	Verspannungen, Quadrizeps	Pferd, Hund	2	1 – 2 x täglich	1 Woche, dann Kontrolle, ggfs Wechsel auf 7
Muskulatur	leichte Zerrung	Pferd, Hund	3	2 x täglich	1 Woche, dann Kontrolle, ggfs Wechsel auf 4
Muskulatur	Zerrung	Pferd, Hund	4	2 x täglich	1 Woche, dann Kontrolle, ggfs Wechsel auf 7
Muskulatur	Muskelriss / -anriss, Erstbehandlung	Pferd, Hund	6	2 x täglich	2 Wochen
Muskulatur	Muskelriss / -anriss, Folgebehandlung	Pferd, Hund	5	2 x täglich	2 – 4 Wochen, evtl Wechsel auf 4 oder 3
Nerven	Quetschung, Regeneration	Pferd, Hund	6	1 x täglich	4 – 6 Wochen
Gelenk	Allgemein, leichte Füllung	Pferd, Hund	2	1 x täglich	
Gelenk	Allgemein, mässige Füllung	Pferd, Hund	3	1 x täglich	2 Wochen, dann Programm 2
Gelenk	Allgemein, mässige Füllung, Schmerz	Pferd, Hund	4	1 x täglich	
Gelenk	Allgemein, starke Füllung, Schmerz	Pferd, Hund	5	1 – 2 x täglich	2 Wochen, dann Kontrolle
Gelenk	Spondylosen HWS	Hund	2	1 – 2 x täglich	evtl. Wechsel auf Programm 6
Gelenk	Spondylosen LWS	Hund	2	1 – 2 x täglich	evtl. Wechsel auf Programm 6
Gelenk	Schmerzen / Arthrosen Ellenbogen	Pferd, Hund	2	1x täglich	
Gelenk	Instabilität im Ileo-Sakral-Gelenk	Pferd, Hund	2	1 – 2 x täglich	
Gelenk	Schmerzen / Arthrosen Hüftgelenke	Pferd, Hund	2	1 – 2 x täglich	
Gelenk	Schmerzen / Arthrosen Karpalgelenke	Pferd	2	1 – 2 x täglich	
Gelenk	Schmerzen / Arthrosen Kniegelenke	Pferd, Hund	2	1 – 2 x täglich	
Gelenk	Schmerzen / Arthrosen Schultergelenk	Pferd, Hund	2	1 – 2 x täglich	
Gelenk	Schmerzen / Arthrosen Sprunggelenk	Hund	2	1 – 2 x täglich	
Gelenk	Spat	Pferd	7	1x täglich	falls zu stark, dann Wechsel auf Programm 2
Gelenk	Distorsionen	Pferd, Hund	4	1 – 2 x täglich	1 Woche, dann Kontrolle
Gelenk	Hüftgelenkdysplasie	Hund	2	1x täglich	
Schmerzen	z.B. FLUTD	Katze	2	1 – 2 x täglich	Behandlung der Grunderkrankung!
Schmerzen	Kissing Spines	Pferd	2	2 x täglich	2 Wochen, dann Kontrolle
Schmerzen	Akuter Schmerz oder Krampf	Pferd, Hund	8	Unmittelbar	
Akupunktur	Aktivierung Akupunktur- und Triggerpunkte	Pferd, Hund	7	2 x wöchentlich	